


V_2_001

PDL Protocol

Overzicht Zitkussens

T. Lutgerink ET © Het Gasthuis Middelburg

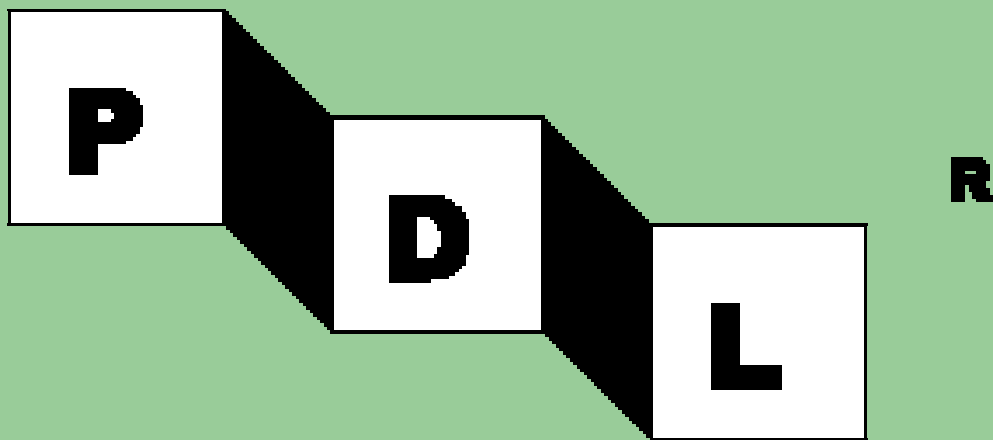

Overzicht zitkussens ergotherapie 't Gasthuis d.d. 08-10-99:

NAAM:	indicatie:	bevindingen:	opmerkingen
Gel/foam	Preventief	Die kussens die nu nog gebruikt worden, zijn bijna alle versleten	Worden door de verpleging verstrekt. Weggooien!
Vezel	Preventief	Voldoen alleen op gepolsterde zittingen; pas op onderuitschuiven!!	Worden door de verpleging verstrekt
DFC	Zijn geschikt tot ± 80kg	Soms gewoon te dun: moeten met inco-hoes verstrekt worden!	AWBZ-verstrekking: wordt via ergo aangevraagd in combinatie met drempelzitting
T-foam	In 3 soorten: tot 60kg, tot 80 kg en boven de 80 kg	De zachtste lijkt qua eigenschappen te dun, dan liever DFC pakken; de middenmaat kan in een dikte van 7 cm geleverd worden; de dikste alleen aan mensen met een lichaamsgewicht boven de 80 kg geven – soms als te stug ervaren	Alle diktes leverbaar. Altijd met inco-hoes verstrekken. AWBZ-verstrekking
Jay-2-cushion	Houdingscorrectie in combinatie met actieve zit; past zich aan de anatomische vormen van het lichaam aan	Overfilled gelpad mogelijk ivm door de standaard gelpad heen zitten met kans op decubitus; na 2 jaar slijt de gelpad: wordt dan harder	Duidelijk aangeven in aanvraag welke voorzieningen waarom worden aangevraagd bij AWBZ
Jay-extreme	Aktieve zit; Anatomisch gevormd	Geen ervaring mee	AWBZ-verstrekking; in ons huis zet ik alleen

			omdat er ook goedkopere anatomisch gevormde kussens zijn en dit kussen vraagt een erg actieve zit. Overigens voldoet dan een Revab Roxx K-zitting ook en is in de rolstoel ingebouwd, dus goedkoper
Z-flo	Semi-actieve zit; enigszins anatomisch gevormd	Geschikt voor mensen die zich helemaal niet meer opdrukken	Voldoet goed bij personen die geen decubitus hebben, en nog met hulp van een persoon \ onder supervisie zelfstandig tot stand komen; AWBZ-verstrekking
Advantage	Semi-actieve zit; voegt zich naar de anatomische vormen van het lichaam	Geeft een goede decubituspreventie aan m.n. die personen die a.h.w. op hun stuitje zitten	Vooraf geschikt voor magere mensen; AWBZ-verstrekking; mag niet zonder hoes verstrekt worden!
Cloud	Semi-actieve zit; anatomisch gevormd; zithoudingcorrectie	Gelpads passen zich aan aan de vorm van het lichaam	Gelpads van verschillende diktes zijn onderling uitwisselbaar; AWBZ-verstrekking. Mag absoluut niet zonder hoes verstrekt worden.
Bos bow	luchtkussens	In verschillende maten leverbaar	Mn geschikt als in een individueel aangepast zitorthese ondanks alles toch nog decubitus op-

			verstrekking
Flotech	Anatomisch gevormd, goedkoop kussen	Zeer zacht en incohoes voldoet goed	Wanneer benen zonder beensteunen afhangen; AWBZ-verstrekking
Flotech	Als vorige	Zeer zachte foam met deel gelpad	Wanneer vorige kussen niet voldoet; AWBZ-verstrekking
Flotech	Als vorige	Als vorige, maar een groter deel van het kussen is voorzien van een gelpad	Wanneer vorige kussen niet voldoet; AWBZ-verstrekking
Conformed	Anatomisch gevormd, zeer dik kussen	Cover is extreem glad en zeer geschikt om mensen goed achterin de rolstoel te positioneren; decubitus preventie matig	Vooraf een uitkomst bij mensen met een zeer lange onderbeenlengte; AWBZ-verstrekking
Roho noppen 5 cm	Goed preventief kussen met zeil-ogen	Wanneer een persoon op een huiskamerstoel zit en de polstering van het kussen onvoldoende is; door het kussen aan de stoel vast te maken wordt het valrisico bij onderuitschuiven tegengegaan	Geen AWBZ-verstrekking; dit jaar kwam ik met mijn twee lage Roho's goed uit, maar misschien moet ik er een extra op de begroting zetten volgend jaar
Roho hoog profiel	Zeer goed AD-kussen	Noppen alleen afbinden bij fistels en botkanker e.d. Liefst verstrekken zonder hoest i.v.m. maximale werking	Soms hoest noodzakelijk i.v.m. beschadiging noppen. AWBZ-verstrekking
Roho 2 compartimenten	Zeer goed AD-kussen met zithoudingscorrectie	Zie boven	Zie boven

Roho Paracare	Anatomisch gevormd; zie boven	Niet geschikt voor zware personen als deze ahw op hun stuitje zitten	Zie boven
Roho Quattro	4 compartimenten welke met elkaar in verbinding staan	Weinig ervaring mee; zou geschikt zijn voor mensen die veel verzitten	Zie boven
Doove Pro-active	Wisseldruk-kussen	Niet geschikt voor zeer mager personen; perfecte AD-werking	Als de druk wisselt geeft dit vaak een gevoel van aandrang en vragen mensen of ze naar het toilet kunnen – dit kan dus zeer hinderlijk zijn. Niet geschikt voor mensen met bot-CA; zeer geschikt voor dwarslaesies. AWBZ-verstrekking